

Mode d'emploi – PD-06 Kit de moulage



Utilisation du kit de moulage Silmark 75

1. Poussez le levier de dégagement (1) vers le haut et tirez simultanément sur la glissière (2) aussi loin que possible.
2. Le volet de verrouillage (3) étant ouvert, insérez la cartouche (4) vers le bas dans les rainures de guidage du distributeur avec l'encoche puis fermez le rabat de verrouillage à nouveau. Poussez la glissière vers l'avant jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

Mélange

3. Retirez le capuchon de la cartouche.
4. La première fois que vous utilisez une cartouche, appuyez sur la gâchette (5) et versez un peu de pâte sur un essuie-tout jusqu'à ce que la base et le catalyseur sortent uniformément. Cela garantit que les pistons sont à la même hauteur et qu'un mélange optimal sera obtenu. Essuyez les ouvertures de la cartouche avec du papier absorbant.
5. Placez l'embout mélangeur (6) sur l'ouverture de la cartouche (suivez le guide) et fixez-le d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Appliquez la pâte en exerçant une pression constante sur la gâchette (5). Évitez les mouvements brusques. Relâcher la gâchette (5), le flux de matière s'arrête. Conservez la pointe dans le matériau lors de l'extrusion pour éviter les bulles d'air et les vides

Ne pas retirer l'embout mélangeur après utilisation! L'embout mélangeur sert de capuchon jusqu'à la prochaine utilisation et évite la contamination de la pâte.

Réutilisation de la cartouche:

6. Desserrez l'embout de mélange usagé en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis retirez-le. Mettez un nouvel embout de mélange, serrez d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre (90 °). Le pistolet est prêt à être utilisé.

Retrait de la cartouche

7. Poussez le levier de dégagement (1) vers le haut et tirez simultanément sur la glissière (2) aussi loin que possible.
8. Ouvrez le volet de verrouillage (3) et retirez la cartouche.

Application sur une grande surface

9. Lorsque vous couvrez une grande surface, répartissez la pâte à côté de l'image à transférer, en veillant à ce qu'il ait une quantité suffisante pour couvrir toute la zone. Conservez TOUJOURS l'embout mélangeur dans le produit distribué pour éviter les bulles et les vides.

Application d'empreintes digitales

10. Une fois la pâte distribuée, utilisez une spatule pour l'étaler dans un sens unique. Ensuite, utilisez une feuille pour aplatir la pâte. Laissez-la durcir pendant le temps imparti avant de la retirer.